

VictorReader® Stratus¹²

Gebruikershandleiding

 Humanware™

Victor Reader Stratus¹² Gebruikershandleiding

V. EN 6-20110411
V.NL 1-20110614

©Copyright 2011.

Snelstarthandleiding voor de Victor Reader Stratus¹²

Welkom bij de Victor Reader Stratus¹², uw nieuwe Daisy speler voor het gesproken boek. De eerste keer dat u de Victor Reader gebruikt, moet u de speler aansluiten op het stopcontact.

Voor de aansluiting op het stopcontact dient u één uiteinde van de meegeleverde AC/DC-kabel in de voedingsaansluiting aan te brengen. Deze bevindt zich op de achterzijde van de speler, enigszins rechts van het midden. Steek het andere uiteinde van de kabel in een stopcontact. Wanneer u de speler voor het eerst ontvangt, nadat de batterij is vervangen of na een lange opslagperiode kunt u de speler het beste gedurende één nacht aangesloten houden op het stopcontact zodat de batterij weer volledig wordt opgeladen.

De **Aan/Uit-toets** kan rood of groen branden. De toets zal rood knipperen wanneer de speler uit is en in het stopcontact zit. Het knipperen betekent dat de batterij wordt geladen. Wanneer het knipperen stopt en de knop heeft brand rood, dan is de batterij opgeladen. Wanneer de speler aan staat, wordt de Aan/uit-toets groen; het maakt hierbij niet uit of de speler in het stopcontact zit of op batterijen werkt. Onder normale omstandigheden duurt het 4 uur voordat de batterij opnieuw is opgeladen, waarna de maximale speelduur voor de meeste Daisy-boeken 10 uur bedraagt. In de loop van de tijd zal de maximale speelduur verminderen door veroudering van de batterij.

U kunt de Victor Reader gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen.

De doos bevat de volgende zaken: de Victor Reader Stratus¹², een masker om toetsen af te dekken (deze kan worden verwijderd om de navigatie toetsen te kunnen gebruiken), een voedingskabel, een plastic zakje met de documentatie, en een CD. De CD bevat een korte snelstart handleiding gevolgd door de gebruikershandleiding.

U kunt het afspelen onderbreken en weer hervatten met de **Afspelen/Stoppen-toets**, die zich onderaan in het midden van de speler bevindt, tussen de **Terugspoeltoets** en de **Vooruitspoeltoets**.

De snelstart handleiding start nu. Plaats de speler vóór u met het handvat aan de linkerkant. Boven het handvat bevindt zich linksboven een ingebouwde luidspreker.

Op de bovenzijde bevinden zich bovenaan in het midden drie paar toetsen. Van links naar rechts zijn dat de toetsen die de **toon**, het **volume** en de **snelheid** regelen.

Onder de toetsen voor de toon, het volume en de snelheid vindt u een **numeriek toetsenblok** met 12 toetsen. Er zit een verhoging op toets 5. U gebruikt dit toetsenblok om door de structuur van het boek te navigeren en om een paginanummer in te voeren. De toetsen 2, 4, 6 en 8 zijn tevens pijltoetsen. Links van de 0 toets is de ster/annuleren toets en rechts van de 0 toets is de hekje/bevestiging toets.

Links van het numerieke toetsenblok, ongeveer in het midden van de speler, bevinden zich nog drie toetsen verticaal onder elkaar. De bovenste is de **Ga naar toets**. Met deze toets kunt u direct navigeren naar een hoofdstuk of pagina. Druk meerdere keren op deze knop om het item te kiezen. De volgende toets is de **Bladwijzertoets**. Met de **Bladwijzertoets** kunt u belangrijke pagina's of paragrafen bewaren om later snel naar terug te springen. Druk meerdere keren op de toets om de gewenste functie (maken, verwijderen, invoegen). De derde toets is de **Eject toets** om de CD uit de CD sleuf te halen.

Rechts naast de 12 numerieke toetsen is de **Aan/Uit-toets**. Deze knop is iets verzonken om te voorkomen dat deze per ongeluk ingedrukt wordt. Wanneer de speler uitstaat en aangesloten is op het lichtnet, dan duurt het iets langer voordat de speler aangaat.

Onder de 12 numerieke toetsen vindt u een groep van 4 toetsen. 3 zitten horizontaal naast elkaar bij de onderrand van de speler. Van links naar rechts zijn dit de **Terugspoeltoets**, de

Afspelen/Stoppen-toets en de **Vooruitspoeltoets**. Boven de **Afspelen/Stoppen-toets** zit de **Slaapstandtoets**. Deze is maanvormig met ernaast een oranje LED-indicator. Druk meerdere keren op deze toets om een van de tijdsintervallen te kiezen, waardoor de speler automatisch uit zal schakelen.

Aan de rechter zijkant zit de oortelefoon aansluiting die ook gebruikt kan worden om een externe luidspreker aan te sluiten. Ernaast op geavanceerde modellen, vindt u een USB-poort en SD-kaartsleuf.

Aan de achterzijde, iets rechts van het midden, zit de voedingsaansluiting.

Aan de voorkant zit de sleuf om de CD in te stoppen.

Een nieuw boek plaatsen en afspelen

Zet de Victor Reader aan door de **Aan/Uit-toets** boven de **Eject-toets** op de bovenzijde van de speler ingedrukt te houden. U hoort nu een piepje en een welkomstbericht.

Plaats de CD in de sleuf aan de voorkant van de speler. Duw de CD voorzichtig aan totdat het mechanisme het van u overneemt en ervoor zorgt dat de CD volledig in het apparaat komt te zitten. Na een paar seconden kondigt de Victor Reader de titel van het boek aan en begint het boek af te spelen.

LET OP: *als u per ongeluk de CD ondersteboven heeft aangebracht, zal deze binnen 15 seconden weer onbeschadigd naar buiten komen.*

U kunt de toonhoogte, het volume en de snelheid aanpassen met de omhoog- en omlaagtoetsen. De toetsen die de toonhoogte, het volume en de snelheid regelen, bevinden zich op de bovenzijde van de speler, bovenaan in het midden.

Om het boek versneld vooruit of terug te spoelen, drukt u op de **Terugspoel-vooruitspoeltoets** en houdt u deze vast totdat u op de gewenste plek bent; vervolgens laat u de toets los. De snelheid wordt dan automatisch weer normaal.

Een leessessie onderbreken

Om een leessessie te onderbreken, drukt u gewoon op de **Afspelen/Stoppen-toets**. Om weer verder te gaan met lezen waar u gebleven was, drukt u de **Afspelen/Stoppen-toets** opnieuw in. Let op: als de speler niet op het stopcontact is aangesloten, en de onderbreking langer duurt dan 30 minuten, schakelt de speler automatisch uit om de batterijen te sparen.

Een leessessie beëindigen

Om een leessessie te beëindigen, zet u de speler eenvoudig uit door de **Aan/Uit-toets** in te drukken en vast te houden totdat de speler meldt dat deze afsluit. De Victor Reader onthoudt waar u gebleven bent, voor uw volgende leessessie.

Een nieuwe leessessie beginnen

Om een nieuwe leessessie in hetzelfde boek te beginnen, zet u de Victor Reader aan door de **Aan/Uit-toets** in te drukken en vast te houden. Na enkele seconden hoort u de titel van het boek en een piepje, waarna de leessessie wordt voortgezet op de plaats waar u bij de vorige sessie was gebleven.

Een CD verwijderen

Om een CD te verwijderen, drukt u gewoon op de **Eject-toets**. De Victor Reader zal "Uitwerpen" zeggen, en na een paar seconden duwt het mechanisme de CD naar buiten.

Toetsbeschrijving

Wanneer er geen media aanwezig is, staat de Stratus automatisch in de toetsbeschrijving functie. Hierin wordt bij iedere toets die ingedrukt wordt een korte beschrijving van de functie gegeven. Hiermee kunt u de speler leren kennen. Wanneer er wel een CD is geladen kunt u deze

functie activeren door de **informatie-toets** (in het midden van de vier **navigatie-toetsen**) langer ingedrukt te houden. Om de functie vervolgens te verlaten drukt u de **informatie-toets** weer iets langer in.

Hiermee is de snelstart handleiding klaar. Over enkele ogenblikken wordt de volledige gebruikershandleiding afgespeeld.

Gebruikershandleiding

Informatie over de Victor Reader Stratus¹²

De Victor Reader Stratus¹² is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke Daisyspeler voor het gesproken boek.

De Victor Reader **Stratus¹²** is speciaal ontworpen voor ontspannende lectuur, zoals bestsellers, romans, tijdschriften etc. Het apparaat maakt het mogelijk om gemakkelijk binnen de boekstructuur te navigeren en snel naar de gezochte informatie te gaan.

Met behulp van de eenvoudig te bedienen functies kunt u de inhoudsopgave raadplegen, naar een bepaalde paragraaf gaan of terugkeren naar een bladwijzer.

We wensen u veel plezierige uren met het ontdekken van alle facetten van deze Daisyspeler voor het gesproken boek!

Table of Contents

SNELSTARHANDLEIDING VOOR DE VICTOR READER STRATUS¹²	I
INFORMATIE OVER DE VICTOR READER STRATUS¹²	V
1. OVERZICHT VAN VICTOR READER STRATUS¹²	1
1.1 De speler uitpakken.....	1
1.2 Optioneel toetsenmasker.....	1
1.3 Beschrijving van de buitenkant van de Stratus ⁴	2
1.3.1 De bovenzijde van de speler.....	2
1.3.2 De linkerkant van de speler.....	3
1.3.3 De rechterkant van de speler.....	3
1.3.4 De voorzijde van de speler.....	3
1.3.5 De achterkant van de speler.....	3
1.4 Batterij.....	3
1.5 De Victor Reader aanzetten.....	4
1.6 Een CD invoeren en uitnemen.....	4
2. BASISFUNCTIES	5
2.1 Regelfuncties voor geluid.....	5
2.2 Afspelen/Stoppen.....	5
2.3 Terugspoelen en vooruitspoelen.....	5
2.4 Bevestigen en annuleren – hekje en ster toetsen.....	5
2.5 Ga naar toets.....	5
2.6 Gebruik van de toetsbeschrijvingsfunctie.....	5
3. NAVIGATIEFUNCTIES	6
3.1 Beschrijving van de toetsen.....	6
3.2 Navigatie toetsen.....	7
3.2.1 Navigatie ongedaan maken.....	7
3.3 Boekenplank.....	7
3.4 Navigatiemodus Tijdsprong.....	7
3.5 Sprongen van tien pagina's.....	8
3.6 Elementen die overgeslagen kunnen worden.....	8
3.6.1 Oproepen elementen die overgeslagen kunnen worden.....	8
3.7 Waar ben ik? – toets 5.....	9
3.8 Willekeurige muziek afspeel mode – toets 9.....	9
3.9 Informatie – toets 0.....	9
3.9.1 Beschikbare informatie items.....	9
4. GEAVANCEERDE FUNCTIES	10
4.1 Slaapstand en tijdmelding.....	10
4.2 Instellen van datum en tijd.....	10
4.3 Bladwijzers.....	11
4.3.1 Bladwijzers aanbrengen.....	11

4.3.2	Highlight bladwijzer	11
4.3.3	Bladwijzer lijst	12
4.3.4	Bladwijzers verwijderen	12
4.3.5	Bladwijzer melding	12
5.	LUISTEREN NAAR EEN MUZIEK- OF MP3-CD	13
5.1	Functies	13
6.	CONFIGURATIE MENU – TOETS 7.....	14
6.1	Menu's en menu item overzicht	14
6.1.1	Afspelen.....	15
6.1.2	Overslaan	15
7.	BATTERIJ VERVANGEN.....	16
7.1	Batterij verwijderen	16
7.2	Nieuwe batterij plaatsen	16
8.	DE SOFTWARE UPDATEN	17
9.	PROBLEMEN OPLOSSEN	18
9.1	Navigeren in een boek.....	18
9.2	Batterij en het opladen ervan.....	18
9.3	CD's.....	19
9.4	Algemeen	20
10.	TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	21
11.	END USER LICENSE AGREEMENT.....	22
12.	APPENDIX 1 - STRATUS ERROR MESSAGES	23

1. Overzicht van Victor Reader Stratus¹²

1.1 De speler uitpakken

Het pakket bevat de volgende zaken: een Victor Reader Stratus¹², een masker om toetsen af te dekken (deze kan worden verwijderd om de navigatie toetsen te kunnen gebruiken), een voedingskabel, een plastic zakje met de documentatie, en deze CD. De CD bevat een korte snelstarthandleiding gevolgd door deze gebruikershandleiding. U kunt de gebruikershandleiding en de snelstarthandleiding desgewenst afdrukken.

Controleer of u alle onderdelen heeft ontvangen en of er geen transportschade is ontstaan.

Voordat u de Victor Reader voor het eerst gaat gebruiken, dient u de speler op het stopcontact aan te sluiten. U kunt de Victor Reader gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen.

1.2 Optioneel toetsenmasker

Uw speler heeft een masker om toetsen af te dekken. Met dit masker op de speler kunt u onder andere de navigatietoetsen afdekken. Als u wel de navigatietoetsen wilt gebruiken, dan kan dit masker worden verwijderd. Het masker zit vast aan de vier hoeken van de speler.

Het masker dekt de volgende toetsen af: ga naar toets, bladwijzer toets en de numerieke toetsen.

Indien u het masker wilt verwijderen volgt u de volgende instructies:

- Houdt de speler aan het handvat vast met uw linker hand.
- Met uw rechter hand gaat u naar de rechter bovenhoek. In het midden van de hoek zit een 'lipje'
- Met de middelvinger kunt u onder dit lipje komen.
- Druk de duim van uw rechter hand op de speler en beweeg uw middelvinger omhoog.
- Als het lipje losgekomen is, doet u hetzelfde in de rechter onderhoek.
- Nu er 2 hoeken los zijn, kunt u het masker er verder afhalen. Indien dit niet gaat kunt u het lipje links onder ook losmaken.

Indien u het masker over de Status wilt plaatsen, moet u deze op de juiste manier op de speler leggen. Als de uitspring van het handvat van de speler en het masker over elkaar liggen, dan kunt u het masker aandrukken in alle hoeken.

1.3 Beschrijving van de buitenkant van de Stratus⁴

1.3.1 De bovenzijde van de speler

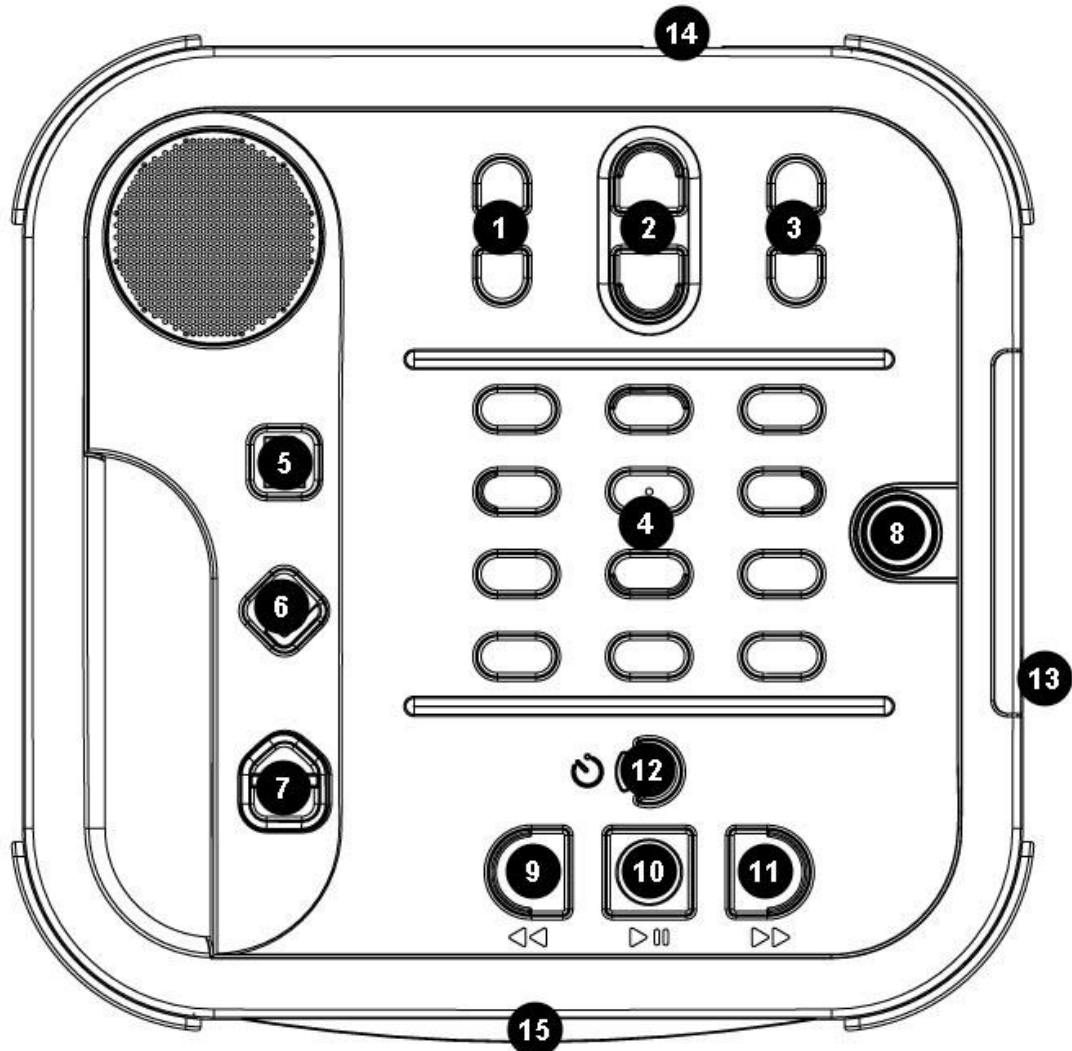


Figure 1: Toetsen

Toetsen:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. <i>toon</i> | 7. <i>Eject toets</i> | 12. <i>Slaapstand toets</i> |
| 2. <i>volume</i> | 8. <i>Aan/Uit-toets</i> | 13. <i>Oortelefoon aansluiting</i> |
| 3. <i>snelheid</i> | 9. <i>Terugspoeltoets</i> | 14. <i>Voedingsaansluiting</i> |
| 4. <i>Numeriek toetsenblok</i> | 10. <i>Afspelen/Stoppen-toets</i> | 15. <i>CD sleuf</i> |
| 5. <i>Ga naar toets</i> | 11. <i>Vooruit spoeltoets</i> | |
| 6. <i>Bladwijzer toets</i> | | |

De ingebouwde luidspreker zit aan de linker bovenzijde.

Op de bovenzijde bevinden zich bovenaan in het midden drie paar toetsen. Van links naar rechts zijn dat de toetsen die de **toon**, het **volume** en de **snelheid** regelen.

Onder de toetsen voor de toon, het volume en de snelheid vindt u, ongeveer in het midden van de speler, de 12 navigatietoetsen. Hiermee kunt u door de structuur van het boek bladeren.

Links van de 12 numerieke toetsen, ongeveer in het midden van de speler, bevinden zich nog drie toetsen verticaal onder elkaar. De bovenste is de **Ga naar toets**. Deze toets kan gebruikt worden om direct naar een pagina te gaan. De volgende toets is de **Bladwijzertoets**. Met de **Bladwijzertoets** kunt u belangrijke pagina's of paragrafen bewaren om later snel naar terug te springen. Druk meerdere keren op deze toets om de gewenste functie te kiezen: maken, verwijderen of invoegen. De derde toets is de **Eject toets** om de CD uit de CD sleuf te halen.

Rechts naast de 12 navigatietoetsen is de **Aan/Uit-toets**. Deze knop is iets verzonken om te voorkomen dat deze per ongeluk ingedrukt wordt.

Onder de 12 navigatietoetsen vindt u een groep van 4 toetsen. 3 zitten horizontaal naast elkaar bij de onderrand van de speler. Van links naar rechts zijn dit de **Terugspoeltoets**, de **Afspelen/Stoppen-toets** en de **Vooruitspoeltoets**. Boven de **Afspelen/Stoppen-toets** zit de **Slaapstandtoets**. Deze is maanvormig met ernaast een oranje LED-indicator. Druk meerdere keren op deze toets om een van de tijdsintervallen te kiezen, waardoor de speler automatisch uit zal schakelen.

1.3.2 De linkerzijde van de speler

Aan de linkerzijde van de speler vindt u het ingebouwde handvat en de ingebouwde luidspreker.

1.3.3 De rechterzijde van de speler

Aan de rechter zijkant zit de oortelefoon aansluiting die ook gebruikt kan worden om een externe luidspreker aan te sluiten.

1.3.4 De voorzijde van de speler

Aan de voorkant zit de sleuf om de CD in te stoppen.

1.3.5 De achterzijde van de speler

Aan de achterzijde, iets rechts van het midden, zit de voedingsaansluiting.

1.4 Batterij

De batterij is berekend op ongeveer 300 oplaadcycli. Bij normaal gebruik heeft een volledig opgeladen batterij een maximale speelduur van 10 uur bij continu afspelen van Daisyboeken. In de volgende gevallen kan de speelduur echter worden gereduceerd:

Als de batterij minder dan 4 uur is opgeladen.

Bij veelvuldig gebruik van de navigatiecommando's.

Niet-Daisy-CD's vereisen meer stroom en hebben een speelduur op de batterij van 3 uur.

Lezen met hoog volume of hoge snelheid.

De batterij wordt automatisch opgeladen zodra de speler op het stopcontact wordt aangesloten. De speler kan tijdens het opladen gewoon worden gebruikt. Als de speler aanstaat wanneer u de adapter aansluit, dan hoort u een geluid ten teken dat de adapter is aangesloten. Ook als u de adapter uit het stopcontact haalt hoort u een geluid.

De batterij is vervangbaar. Dit staat verderop beschreven.

Als de speler wordt uitgeschakeld, knippert de LED-indicator voor de voeding als de batterij wordt opgeladen. Het duurt 4 uur voordat de batterij volledig is opgeladen.

LET OP: *als de speler niet op het stopcontact is aangesloten, en het voorlezen is gepauzeerd en de onderbreking duurt langer dan 30 minuten, dan schakelt de speler automatisch uit om de batterij te sparen.*

1.5 De Victor Reader aanzetten

Om de speler aan te zetten, drukt u de **Aan/Uit-toets** in en houdt u deze ingedrukt. U hoort nu een piepje en een welkomstbericht.

Om de speler uit te zetten, drukt u de **Aan/Uit-toets** opnieuw in en houdt u deze ingedrukt. U hoort nu twee piepjes, wat aangeeft dat de speler wordt uitgeschakeld.

De **Aan/Uit-toets** kan verschillende kleuren hebben:

- Als de speler aan staat is de toets groen.
- Als de speler uit staat en aangesloten is op het stopcontact en is aan het opladen, dan is de toets rood en knippert.
- Als de speler uit staat en aangesloten is op het stopcontact en opgeladen is, dan is de toets rood en knippert niet.
- Als de speler uit staat en niet op het stopcontact is aangesloten, dan is de toets niet verlicht.

1.6 Een CD invoeren en uitnemen

Stop de CD in de sleuf aan de voorzijde van de speler. Duw de CD vervolgens zachtjes in de sleuf. Een mechanisme schuift de CD helemaal naar binnen. Na enkele seconden kondigt de Victor Reader de titel van het boek aan en begint deze na een piepgeluid het boek af te spelen. Als u per ongeluk de CD ondersteboven heeft aangebracht, zal deze binnen 15 seconden weer onbeschadigd naar buiten komen.

Om een CD te verwijderen, drukt u gewoon op de **Eject-toets**. Deze zit links als onderste van een rij van 3 verticaal geplaatste toetsen. Een mechanisme schuift de CD voorzichtig uit de sleuf.

LET OP: *de **Eject-toets** werkt alleen als de Victor Reader is ingeschakeld.*

2. Basisfuncties

2.1 Regelfuncties voor geluid

Voor elk van de regelfuncties voor **toon**, **volume** en **snelheid** is er een toets **Omhoog** en een toets **Omlaag**. Een piepgeluid geeft het bovenste en onderste bereik van elke regeling aan. Als er geen boek wordt afgespeeld, meldt de Victor Reader wat de instelpositie is. Voor toon en snelheid klinkt bovendien een piepgeluid om de normale positie of 0-positie aan te geven. Dit duidt op een vlakke tooninstelling of een normale snelheidsinstelling.

2.2 Afspelen/Stoppen

Om te beginnen met het afspelen van een boek, drukt u op de **Afspelen/Stoppen-toets**.

Om het afspelen te stoppen, drukt u nogmaals op de **Afspelen/Stoppen-toets**.

2.3 Terugspoelen en vooruitspoelen

Met deze toetsen kunt u vooruit- of terugspoelen. U hoort de opname op een hogere snelheid.

Druk op de **terugspoel-** of de **vooruitspoel toets** en houd deze vast totdat u op de gewenste plek bent; de werking van de **terugspoel-** of de **vooruitspoel toets** zal versnellen naarmate u de desbetreffende toets langer vasthoudt. Voor elke paar seconden dat u de toetsen vasthoudt, spoelt u 1 minuut, 2 minuten, 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten etc. vooruit of terug. De maximale sprong hierbij is 5 minuten. De Victor Reader kondigt de tijdsprongen aan en speelt tussen elke sprong een clip af op normale snelheid. U kunt ook kort op de **terugspoel-** of de **vooruitspoel toets** drukken om sprongtjes van 5 seconden te maken.

2.4 Bevestigen en annuleren – hekje en ster toetsen

Met de hekje toets kan functie bevestigd worden of kan het zoeken naar een pagina worden gestart nadat het paginanummer ingevoerd is. Met de ster toets kan een activiteit geannuleerd worden. Deze toetsen zitten rechts (hekje) en links (ster) van de 0 toets.

2.5 Ga naar toets

Met de ga naar toets kan direct worden genavigeerd naar een pagina, hoofdstuk, bestand of ander item. Druk meerdere keren op deze toets om een item te kiezen en geef vervolgens met de numerieke toetsen een nummer in. Druk op bevestigen (hekje) om naar de locatie te springen of druk op afspelen om naar de locatie te springen waarna direct het afspelen start.

Wanneer er een nummer ingevoerd moet worden, kan met de 0 of de terugspoelen knop naar het begin van het boek worden genavigeerd en met de vooruitspoelen toets naar het einde van het boek.


2.6 Gebruik van de toetsbeschrijvingsfunctie

Met de *toetsbeschrijvingsfunctie* leert de gebruiker de functie kennen van elke toets van de Victor Reader. Dit is vooral handig wanneer de gebruiker leert hoe de speler moet worden bediend.

Als zich geen CD in de speler bevindt: de *toetsbeschrijving* wordt automatisch geactiveerd. Als er wel een CD in de speler zit, kan deze functie worden geactiveerd door de informatie toets langere tijd in te drukken. Druk de informatie toets nogmaals langer in om de *toetsbeschrijvingsfunctie* te verlaten.


3. Navigatiefuncties

3.1 Beschrijving van de toetsen

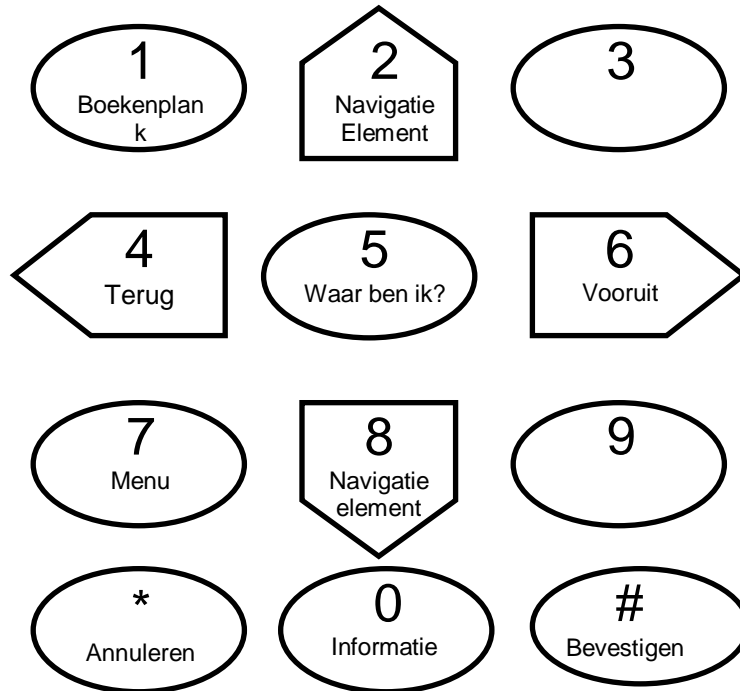

- 1: Boekenplank
- 2: Omhoog/ Navigatie element
- 3: Geen extra functie
- 4: Links/Terug
- 5: Waar ben ik?
- 6: Rechts/Vooruit
- 7: Menu
- 8: Omlaag/Navigatie element
- 9: Willekeurige selectie (Bij muziek)
- Ster toets: Annuleren
- 0: Informatie als kort ingedrukt, toetsbeschrijving als de toets ingedrukt gehouden wordt
- Hekje toets: Bevestigen

3.2 Navigatie toetsen

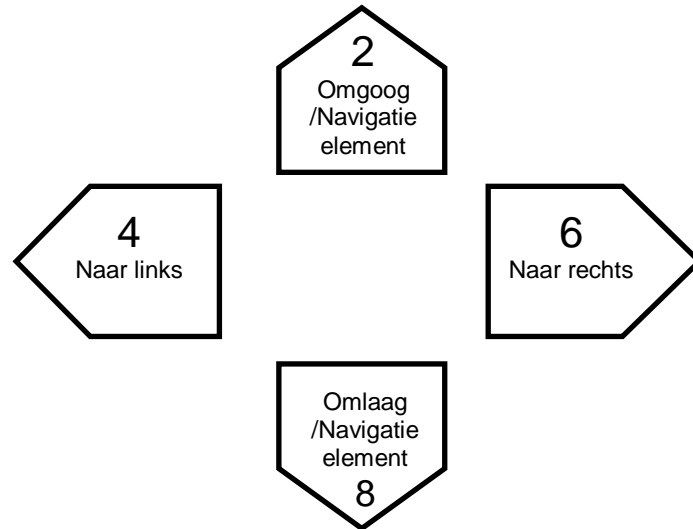

De toetsen 2, 4, 6 en 8 hebben opstaande randen om de functie aan te geven: omhoog, links, rechts en omlaag. Met deze toetsen kan door verschillende niveaus gebladerd worden.

Voorbeelden: verplaatsing per hoofdstuk (niveau 1), paragraaf (niveau 2), pagina, alinea, boek of andere onderdelen die door de producent van het boek zijn gedefinieerd.

Kies eerst een boekonderdeel (hoofdstuk, pagina, etc.). Druk herhaaldelijk op de toets **Omhoog** of **Omlaag** totdat u het gewenste onderdeel hoort. Het laatst genoemde onderdeel wordt geselecteerd.

Gebruik vervolgens de toets **Naar rechts** om vooruit of de toets **Naar links** om terug te bladeren tot het gewenste boekonderdeel. Het laatst genoemde onderdeel wordt geselecteerd. Het lezen begint in het geselecteerde boekonderdeel.

3.2.1 Navigatie ongedaan maken

Met de annuleren (ster) toets kan binnen 10 seconden na het vooruit of terug navigeren de sprong ongedaan worden gemaakt en u keert terug naar de vorige positie. Het ongedaan maken van navigatie kan alleen indien er met de toetsen 4 en 6 is genavigeerd en werkt niet indien er vooruit of terugspoeld is met de toetsen naast de afspelen toets.

3.3 Boekenplank

Indien een Daisy CD meerdere titels bevat kunt u via toets 1 bij de boekenplank komen. Met de toetsen 4 en 6 kunt u naar een andere titel springen. Of druk op de ga naar toets gevolgd door een boeknummer en druk op bevestigen (hekje). Druk op afspelen of bevestigen om te lezen in het gewenste boek. U kiest voor afspelen als u in de boek wilt verdergaan waar u bent gebleven.

3.4 Navigatiemodus Tijdsprong

Tijdsprong-navigatie is beschikbaar voor Daisy-boeken, indien geactiveerd. Deze functie kan worden geactiveerd met behulp van de toetsen 2 en 8.

Druk op de toets **Naar links** om met dit tijdsinterval terug en op de toets **Naar rechts** om vooruit te gaan.

De tijdsprong kan ingesteld worden op 1, 5, 10 of 30 minuten in het navigatie en afspelen onderdeel in het configuratiemenu (toets 7).

3.5 Sprongen van tien pagina's

Met de toetsen **Naar links** en **Naar rechts** kunt u in sprongen van 10 pagina's naar een bepaalde pagina gaan.

Selecteer pagina-navigatie door op de toets **Omhoog** of **Omlaag** te drukken totdat u "Pagina" hoort.

Druk vervolgens op de **Terugspoel-** of de **Vooruitspoeltoets** en houd deze vast. U hoort de Victor Reader in sprongen van tien pagina's achteruit of vooruit gaan.

Laat de toets los wanneer u in de buurt van de gewenste pagina bent. Spring vervolgens per pagina door de **Terugspoel-** of de **Vooruitspoeltoets** in te drukken totdat u de gewenste pagina heeft bereikt.

Indien het boek geen navigatie op pagina niveau bevat, dan is het pagina niveau niet beschikbaar wanneer u de pijltoetsen **Omhoog** of **Omlaag** gebruik.

3.6 Elementen die overgeslagen kunnen worden

De speler ondersteunt de volgende elementen die overgeslagen kunnen worden: voetnoot, pagina nummer, producent informatie en sidebar. Deze elementen kunnen ingesteld worden als 'afspelen', 'overslaan' of 'op verzoek'. Zie voor verdere uitleg het hoofdstuk waarin het configuratie menu wordt besproken.

Wanneer een dergelijk element tijdens het afspelen voorkomt, zal de speler het volgende doen:

- Ingesteld als 'afspelen': het element wordt altijd afgespeeld
- Ingesteld als 'overslaan': het element wordt nooit afgespeeld
- Ingesteld als 'op verzoek': het element wordt niet afgespeeld maar wordt toegevoegd aan een oproep lijst en de naam van het element wordt genoemd. Deze optie is niet beschikbaar voor pagina en regel nummer elementen.

3.6.1 Oproepen elementen die overgeslagen kunnen worden

De elementen die in de oproeplijst staan kunnen met de hekje toets bekeken worden.

De speler onthoudt de laatste 5 items. De laatst genoemde komt als eerste in de lijst. Door nogmaals op de hekje toets te drukken wordt naar het volgende item gegaan. Wanneer een item is gekozen wordt de naam genoemd en het afspelen begint aan het begin van dit item. Wanneer het einde van het item is bereikt hoort u de boodschap 'terugkeren naar de tekst' en de het boek wordt afgespeeld vanaf het moment van de onderbreking.

Tijdens het afspelen van een item kan er op de ster toets worden gedrukt om het afspelen van het item te onderbreken en terug te keren naar de tekst.

3.7 Waar ben ik? – toets 5

De waar ben ik toets geeft informatie over de positie in het boek zonder het voorlezen te verstoren. Afhankelijk van het type boek worden een of meer pagina en kop nummers, sectie titel en bestandsnaam. Bij muziek en andere audio bestanden zal de naam van de map, bestandsnamen en tijden worden aangegeven. Bij gesproken boeken en tekstbestanden zal het percentage van wat er afgespeeld is.

3.8 Willekeurige muziek afspeel mode – toets 9

Tijdens het afspelen van muziek kan op toets 9 worden gedrukt om de speler zelf te laten kiezen welk nummer afgespeeld wordt. Door nogmaals op 9 te drukken wordt deze functie uitgeschakeld. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de muziek in een map staat die \$VRmusic heet.

3.9 Informatie – toets 0

De informatie toets geeft informatie over het boek, de speler en de batterij. Er zijn 2 manieren om toegang te krijgen tot deze informatie.

Druk op de informatie toets (toets 0). Alle informatie wordt gegeven. Of druk op de informatie toets en druk op de toetsen 4 of 6 om terug of vooruit te gaan door de verschillende items. Ook door meerdere keren op de informatie toets te drukken kunt u door de verschillende items springen.

Om de informatie te stoppen drukt u op ster of afspelen toets.

Door de informatie toets ingedrukt te houden kunt u de toetsbeschrijving modus starten en stoppen.

3.9.1 Beschikbare informatie items

De beschikbare informatie items zijn:

- Boek titel
- Aan bestanden en mappen (alleen op Muziek boekenplank)
- Aantal pagina's en totale tijd
- Totaal aantal koppen in het boek
- Verstreken afspeeltijd en totale afspeeltijd
- Aantal geplaatste bladwijzers
- Aantal boeken
- Of de speler op het lichtnet aangesloten is (en de batterij geladen wordt) of dat de speler op batterijen werkt
- Batterij niveau
- Software versie, model, nummer, eventuele autorisatie sleutels en het serienummer.

Het serienummer staat ook aan de binnenkant van het batterij compartiment.

4. GEAVANCEERDE FUNCTIES

4.1 Slaapstand en tijdmelding

U kunt op de **Slaapstand toets** drukken om de tijdmelding te horen en de slaapstand te activeren.

Druk eenmaal om de tijd, gevolgd door de dag en de datum te horen.

Met de slaapstand kan de speler ingesteld worden om na een bepaalde tijd vanzelf uit te gaan. Er zijn voorinstelde tijdsintervallen: 15 minuten, 30 minuten, 45 minuten, 60 minuten en 'zelf bepalen'. Met de mogelijkheid om zelf een interval te bepalen kunt u via de numerieke toetsen een tijd instellen. Bevestig de invoer met de hekje toets.

Druk meerdere keren op de slaapstand toets om de gewenste tijd te selecteren. Om de slaapfunctie uit te zetten als deze ingesteld is, druk meerdere keren op de slaapstand toets to de melding 'slaapstand uit'.

Wanneer de slaapstand actief is, gaat er een oranje lampje branden naast de slaapstand toets. Eén minuut voor de speler uitgeschakeld zal worden gaat het lampje knipperen en u hoort een melding 'slaapstand, één minuut voor afsluiten'. Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, zal de speler melden dat deze uitschakelt en gaat uit zonder verdere geluiden.

4.2 Instellen van datum en tijd

Om de tijd in te stellen houdt u de slaapstand toets langer ingedrukt. Gebruik de 2 en 8 toets om door het menu te bladeren. Het menu bevat de volgende items: 'Tijd instellen', 'Datum instellen', 'Geavanceerde tijd instellingen'. Kies het menu item met de toets 6, bevestigen of afspelen. Dit menu heeft verschillende sub menu items. Kies de gewenste waarde met de numerieke toetsen. Druk op bevestigen of afspelen om naar het volgende submenu item te gaan of druk op annuleren om naar het hoofdmenu te gaan. Als een verkeerde invoer is gedaan wordt gevraagd om nogmaals een invoer te doen. Wanneer u het laatste menu item heeft bereikt, druk op bevestigen of afspelen om de instellingen te bewaren en terug te gaan naar het datum en tijd configuratie menu.

Het menu kan op ieder moment verlaten worden met de toets voor de slaapstand.

Overzicht menu's en sub menu's:

- Tijd instellen: Uur, Am/Pm (bij 12h tijdsformaat), Minuut
- Datum instellen: Jaar, Maand, Dag
- Geavanceerde tijd instellingen: 12h/24h tijdsformaat, Zomertijd (met toets 2 en 8 kunnen de instellingen aangepast worden)

De zomertijd instelling is een snelle manier om de tijd een uur vooruit of achteruit te zetten met de keuze voor standaard tijd (uur terug) of zomertijd (uur vooruit). Deze instelling zorgt er niet voor dat de tijdinstelling automatisch gaat om de 2 momenten dat dit voorkomt per jaar, maar is een snellere manier om de tijd op dat moment een uur te verschuiven.

Voorbeeld:

U wilt de instelling voor de maand aanpassen:

- Houdt de slaapstand toets langer ingedrukt totdat u de menu melding hoort.
- Druk éénmaal op de 8 om bij het datum instellen menu te komen.
- Druk tweemaal op de bevestigen toets om het submenu voor Maand te bereiken.
- Voer de maand in met de numerieke toetsen.

- Druk op bevestigen om in het volgende submenu (dag) te komen. Als u de dag niet wilt aanpassen, druk dan nogmaals op bevestigen om het einde van het Datum instellen menu te bereiken, zodat de instellingen bewaard zullen worden.
- Druk 1 maal op de slaapstand toets om het menu te verlaten.

4.3 Bladwijzers

De Bladwijzertoets markeert bepaalde posities in het boek, zodat u deze later kunt terugvinden.

Bladwijzers en de positie in het boek worden, worden per boek opgeslagen.

Druk eenmaal op de bladwijzer toets tot u ga naar bladwijzer hoort. Voer het nummer van de bladwijzer in met de numerieke toetsen en druk op de bevestigen (hekje) toets. De speler gaat naar de bladwijzer en zal het nummer aangeven. Of druk op de afspelen toets en de speler zal direct beginnen met afspelen.

4.3.1 *Bladwijzers aanbrengen*

Druk op de **Bladwijzertoets** en houd deze vast om een bladwijzer in te voegen. Of druk 2 maal op de Bladwijzertoets om de functie te starten. Voer een nummer in tussen 1 en 99998 dat u wilt toewijzen aan de bladwijzer. Druk op de bevestigen toets (hekje) om de bladwijzer toe te wijzen. Of druk op afspelen om te bevestigen en direct door te gaan met lezen. Als u geen nummer invoert, zal het eerstvolgende beschikbare nummer toegewezen worden aan de bladwijzer.

4.3.2 *Highlight bladwijzer*

De highlight bladwijzer wordt gebruikt om een begin en eind positie van een passage te bewaren. Hiermee kunnen belangrijke stukken gemakkelijk later worden beluisterd.

4.3.2.1 *Highlight bladwijzer starten*

Druk 3 maal op de bladwijzer toets totdat u hoort 'start highlight bladwijzer'. Toets een nummer in, gevolgd door bevestigen of de afspelen toets.

Als u geen nummer invoegt, dan zal er automatisch een nummer toegewezen worden.

4.3.2.2 *Highlight bladwijzer eindigen*

Nadat het startpunt is ingegeven gaat u naar het einde van de passage die gemarkeerd moet worden. Druk eenmaal op de bladwijzer toets. U hoort nu 'eind van highlight bladwijzer'. Druk op bevestigen of op de afspelen toets. De huidige positie is nu de eindpositie van de bladwijzer. Als de eindpositie voor de start positie is, dan worden deze omgedraaid. U hoort nu dat de highlight bladwijzer is geplaatst. Het aanbrengen van de bladwijzer kan ook afgebroken worden met de ster toets.

Wanneer er een highlight bladwijzer startpunt is aangemaakt, maar geen eindpunt, dan is het bladwijzernummer niet meer beschikbaar.

Als u het boek verwijderd of de speler uitzet voordat u een eindpunt heeft aangemaakt, dan wordt de huidige locatie automatisch als eindpunt genomen.

4.3.2.3 *Ga naar highlight bladwijzer*

Wanneer u naar een highlight bladwijzer gaat door na het invoeren van het nummer op afspelen te drukken, zal de bladwijzer afgespeeld worden en stopt het afspelen aan het einde van de bladwijzer. Als u na het invoeren van het nummer op bevestigen (hekje toets) heeft gedrukt, dan gaat de speler naar het begin van de bladwijzer maar het afspelen start niet.

Met de terugspoelen toets kunt u tijdens het afspelen naar het begin van de bladwijzer gaan. Aan het einde kan er opnieuw afgespeeld worden door ook op de terugspoelen toets te drukken.

4.3.2.4 Lijst van highlight bladwijzers

Een bladwijzer zonder eindpunt wordt niet weergegeven in de lijst met bladwijzers.

4.3.2.5 Verwijderen highlight bladwijzer

Wanneer een highlight bladwijzer wordt verwijderd, dan wordt er een melding uitgesproken. Het is mogelijk om een bladwijzer die alleen is gestart maar niet is geëindigd te verwijderen.

4.3.3 Bladwijzer lijst

Druk 4 maal op de bladwijzer toets totdat u bladwijzer lijst hoort. Met de 4 en 6 toets kunt u door de bladwijzers bladeren. U hoort nu het nummer van de bladwijzer en de Victor Reader begint af te spelen. Druk op bevestigen om de huidige positie te bevestigen en door te gaan met afspelen. Druk op annuleren om de lijst te verlaten.

LET OP: *het bladwijzeroverzicht bevat altijd één bladwijzer voor het begin en het einde van een boek. Bladwijzers worden gesorteerd op hun plaats in het boek, niet op hun nummer.*

4.3.4 Bladwijzers verwijderen

Druk 5 maal op de **Bladwijzertoets** totdat u verwijderen bladwijzer hoort. Voer het nummer in en druk op bevestigen. Om alle bladwijzers in het boek te verwijderen drukt u 5 maal op de bladwijzertoets en voer 5 maal de 9 in (99999) gevolgd door bevestigen.

LET OP: *bladwijzers en de huidige positie worden altijd afzonderlijk opgeslagen voor elk boek.*

4.3.5 Bladwijzer melding

Tijdens het afspelen van een boek kunt u een melding krijgen wanneer u een net aangebrachte bladwijzer passeert. Deze melding staat standaard uit. In het hoofdstuk over het configuratie menu leest u meer.

5. Luisteren naar een muziek- of MP3-CD

De Victor Reader is niet alleen geschikt voor het afspelen van gesproken boeken. U kunt tevens standaard audio-CD's en MP3-CD's afspelen, zodat u uw favoriete muziek of MP3-boeken kunt beluisteren.

LET OP: mappen en bestanden worden alleen gebruikt bij MP3-CD's; bij het afspelen van een gewone muziek CD (CDA muziekbestanden) is alleen navigatie van track naar track mogelijk.

5.1 Functies

Navigatie: Met de toetsen **Naar links** en **Naar rechts** kunt u naar het vorige of het volgende bestand in dezelfde map gaan. Wanneer het huidige bestand het eerste of het laatste bestand in een map is, kunt u met de toetsen **Naar links/Naar rechts** naar het laatste of het eerste bestand van de vorige respectievelijk de volgende map gaan.

Afspelen: CD's worden continu afgespeeld; aan het eind van een bestand gaat de speler naar het volgende bestand, en de speler stopt aan het einde van het laatste bestand in de bestandslijst.

Via de **Informatietoets** (0) krijgt u direct toegang tot de volgende informatie:

Aantal bestanden en mappen (alleen bij MP3 CD)

Aantal tracks (alleen bij CDA/standaard muziek CD)

Totale afspeeltijd

Tijd verstreken

Resterende afspeeltijd

Aantal bladwijzers

Werking op batterij of netadapter

6. Configuratie menu – toets 7

Met het configuratiemenu kunnen instellingen worden gemaakt.

Om het menu te openen, druk op toets 7. Door nogmaals op de 7 te drukken gaat u naar het volgende menu. Loop door menu items met de 2 en 8 toets, en kies een waarde met de toetsen 4 en 6. Gebruik de hekje toets om een item te bevestigen. Druk op de ster toets om het menu te verlaten.

6.1 Menu's en menu item overzicht

De beschikbare menu's, menu items en waarden staan beschreven in de volgorde waarin ze in de speler staan. De waarden die vooraan staan in een menu zijn de waarden zoals standaard bij de speler ingesteld.

Menu: Navigatie en afspelen

Item: afspelen

Instellingen: doorlopend (inschakelen of uitschakelen)

Item: Tijdsprong

Instellingen: 1, 5, 10 of 30 minuten tijdsprong voor het navigatie menu met toetsen 2 en 8

Item: Toets geluiden

Waarden: inschakelen of uitschakelen

Item: Slaapstand berichten

Waarden: inschakelen of uitschakelen

Item: Bladwijzer melding

Waarden: inschakelen of uitschakelen

Menu: Overslaan

Item: alles

Waarden: afspelen, overslaan, op aanvraag, aangepast

Item: Voetnoot

Waarden: afspelen, overslaan, op aanvraag

Item: Pagina nummer

Waarden: afspelen, overslaan

Item: Producent notitie

Waarden: afspelen, overslaan, op aanvraag

Item: Sidebar

Waarden: afspelen, overslaan, op aanvraag

6.1.1 Afspelen

6.1.1.1 Doorlopend

Wanneer de doorlopende modus wordt geselecteerd, wordt er bij het bereiken van het einde van het boek automatisch weer aan het begin van het boek gestart.

6.1.1.2 Toets geluiden

De geluiden die u bij het indrukken van een toets hoort kunnen in of uitgeschakeld worden. Bij het uitschakelen van de toets geluiden wordt de tweede toon onderdrukt, die u normaal hoort bij het starten van het afspelen. De toets geluiden staan standaard aan.

De toon, volume en snelheid toetsen geven alleen een toon op de minimum, standaard en maximum waarden, onafhankelijk van deze menu instelling.

6.1.1.3 Slaapstand berichten

De slaapstand 1 minuut waarschuwing en slaapstand-uit berichten kunnen in of uitgeschakeld worden. Ze staan standaard aan.

6.1.2 Overslaan

Het overslaan menu bevat de instellingen voor de items die overgeslagen kunnen worden. Afspelen is de standaard waarde. De menu items met hun waarden zijn:

Alles

Waarden: afspelen, overslaan, op aanvraag, aangepast

Voetnoot

Waarden: afspelen, overslaan, op aanvraag

Pagina nummer

Waarden: afspelen, overslaan

Producent notitie

Waarden: afspelen, overslaan, op aanvraag

Sidebar

Waarden: afspelen, overslaan, op aanvraag

7. Batterij vervangen

Neem voor het kopen van vervangende batterijen contact op met Optelec. Reserve batterijen zijn ook te koop in onze webshop www.shoptelec.nl in de Productgroep 'Daisyspelers en memorecorder' staat de categorie Daisy spelers/software, met daaronder de subcategorie Daisy speler accessoires.

7.1 Batterij verwijderen

Plaats de Victor Reader vóór u.

Draai de Victor Reader ondersteboven. Het handvat van de speler moet aan de achterzijde bevinden.

Zoek het deksel van het batterijcompartiment. Deze zit vlakbij de opening van het handvat. Er zijn 2 schuifknoppen, die beiden 3 reliëfmarkeringen hebben. Het deksel bevindt zich net onder deze schuifknoppen. Op het deksel te openen duw gelijktijdig de 2 schuifknoppen van elkaar af met uw duimen. Het deksel komt dan omhoog, waarna u de batterij kunt verwijderen.

7.2 Nieuwe batterij plaatsen

De batterij voor de Victor Reader is zodanig ontworpen, dat deze er slechts op één manier in kan worden geplaatst.

Om de batterij correct in het compartiment te kunnen plaatsen, dient u deze eerst plat voor u neer te leggen.

De batterij is langwerpig. Op een kant zit een label, dit is de onderzijde. 2 van de 4 zijanten zijn glad, de andere 2 hebben een connector en een uitstulping. Aan een kant zit een enkele uitstulping. De andere kant heeft een connector in het midden en 2 uitstulpingen aan beide zijden van de connector.

Doe de batterij met het label naar onderen en de connector naar voren. In de speler zitten corresponderende openingen. Druk de batterij naar beneden zodat deze goed op z'n plaats komt. Het deksel kan nu teruggeplaatst worden.

Een nieuwe batterij is normaalgesproken voor 50% geladen.

Let op: de nieuwe batterij moet ongeveer drie maal volledig worden opgeladen en ontladen om de optimale oplaadcapaciteit te bereiken.

8. De software updaten

Er kunnen updates van de software uitgebracht worden. De update is een .UPG bestand.

Om de update te doen volgt u de volgende stappen:

- Zet het .UPG bestand op een CD
- Sluit de speler aan op het stopcontact
- Doe de speler aan en stop de CD erin
- De update start en u hoort het nieuwe versienummer dat wordt ingeladen. Iedere 10 seconden hoort u een bericht dat het installatie proces nog bezig is.
- Na de update gaat de speler automatisch uit.
- Als de speler weer aangezet wordt, komt de CD met de update er automatisch uit

9. Problemen oplossen

9.1 Navigeren in een boek

1. Waarom noemt de Victor Reader niet altijd dezelfde Daisy-niveaus als ik op de toetsen Omhoog en Omlaag druk?
Met de toetsen Omhoog (2) en Omlaag (8) kunt u door de Daisy-navigatieniveaus bladeren die door de producent van het boek zijn aangebracht. Niet alle Daisy-boeken hebben dezelfde navigatieniveaus. Bijvoorbeeld: de producent van uw boek heeft alleen niveau 1 markeringen (vaak gebruikt voor hoofdstukken) in het boek ingevoerd. In dat geval zullen de toetsen Omhoog en Omlaag alleen “niveau 1” en “zinsdeel” aankondigen. Er is altijd een zinsdeelniveau aanwezig. De Victor Reader kan alleen maar navigeren op de niveaus die de boekproducent heeft aangebracht. Vaak werkt de functie GA NAAR PAGINA niet, omdat veel boeken worden geproduceerd zonder Daisy-paginamarkeringen. Ook het springen van zinsdeel naar zinsdeel is niet in ieder boek hetzelfde. Sommige producenten brengen een zinsdeelmarkering aan voor een enkele zin, terwijl andere zinsdelen markeren als een willekeurige tijdsprong. Weer andere producenten hebben oudere cassetteboeken geconverteerd en de totale kant van één cassette als één zinsdeel ingevoerd. Bij boeken met weinig of geen Daisy-navigatiemarkeringen moet u navigeren met behulp van de Snelvooruitspoeltoets en de Terugspoeltoets. De Terugspoeltoets bevindt zich links van de Afspelen/Stoppen-toets, en de Snelvooruitspoeltoets bevindt zich rechts van de Afspelen/Stoppen-toets.
2. Hoe weet ik welke Daisy-navigatieniveaus er in mijn boek zitten?
Met de toetsen Omhoog en Omlaag van de Victor Reader kunt u de beschikbare navigatieniveaus van een boek doorlopen. Veel boekproducenten plaatsen aan het begin van een boek een overzicht met informatie over de Daisy-niveaus in het boek. Informeer bij uw boekproducent als u vragen heeft over de navigatiefuncties van een boek.
3. Hoe kom ik snel aan het begin of einde van een boek?
De Victor Reader bevat automatische bladwijzers voor het begin en het einde van een boek. Druk op de Bladwijzertoets totdat de Victor Reader zegt “Overzicht bladwijzers”. Druk vervolgens op de linker pijltjestoets (4) totdat u hoort “Begin van boek”. Het begin van een boek bevindt zich altijd links van de door de gebruiker aangebrachte eerste bladwijzer. Als u het einde van het boek zoekt, drukt u op de rechter pijltjestoets (6) in het bladwijzeroverzicht totdat u hoort “Einde van boek”. Het einde van het boek bevindt zich altijd rechts naast de door de gebruiker aangebrachte laatste bladwijzer. Als u geen bladwijzers heeft ingevoegd, dan hoeft u slechts op de linker pijltjestoets in de bladwijzeroverzicht te drukken om bij het begin van het boek te komen, of de rechter pijltjestoets om naar het einde te gaan.

9.2 Batterij en het opladen ervan

1. Beschadigd de batterij als de speler langere tijd in het stopcontact zit?
Nee. Gebruikt u de speler langere tijd niet bijvoorbeeld vanwege een vakantie, dan wordt aangeraden de stekker uit het stopcontact te halen om schade door blikseminslag of piekspanning te voorkomen
2. Kan de batterij worden vervangen?
Ja. Optelec verkoopt reserve batterijen. De procedure voor het verwijderen en plaatsen van de batterij staan in deze handleiding beschreven in hoofdstuk 6.
3. Hoeveel keer kan de batterij opgeladen worden voordat deze zijn capaciteit verliest en vervangen dient te worden.
De batterij kan ongeveer 300 oplaad/ontlaad cycli aan. Daarna zal de batterij nog wel laden maar de capaciteit neemt wel af, zodat er steeds minder tijd los van de netstroom

op de batterij kan worden afgespeeld. Indien de batterij niet meer oplaadt dient deze vervangen te worden.

4. Wat moet er gedaan worden als de speler langere tijd niet gebruikt wordt.
Indien de speler langer dan 3 maanden niet gebruikt wordt, dan is het het beste om de batterij uit de speler te halen. De speler en batterij moeten onder de volgende condities worden bewaard: temperatuur tussen -20 en +35 graden en een luchtvochtigheid tussen 5 en 90%.

9.3 CD's

1. Wat moet ik doen als de CD blijft steken en niet uitgeworpen wordt?
Probeer eerst de Victor Reader uit en daarna weer aan te zetten, en vervolgens op de Eject-toets te drukken. Als de Aan/Uit-toets niet lijkt te werken (u hoort geen piepje als u erop drukt), houd de toets dan 10 seconden vast en laat hem vervolgens los. Houd de Eject-toets daarna ingedrukt terwijl u opnieuw de Aan/Uit-toets indrukt. Houd de Eject-toets ingedrukt totdat u hoort "Welkom bij de Victor Reader". De Victor Reader moet de CD dan uitwerpen.
2. Kan ik de Victor Reader beschadigen als ik de CD er ondersteboven insteek?
Nee, de Victor Reader zal de CD gewoon weer uitwerpen.
3. Waarom maakt de Victor Reader om de paar minuten jankende of schrapende geluiden?
Dit zijn de normale geluiden van de CD-rom drive wanneer de speler informatie van de CD leest. Nadat er bij Daisy-boeken informatie van de CD is gelezen, zal de CD langzamer gaan draaien om stroom te besparen en gedurende enkele minuten stil blijven, totdat er weer informatie van de CD moet worden gelezen. Als u de navigatietoetsen indrukt of naar een bladwijzer springt, dan zal dit ook tot gevolg hebben dat de CD sneller gaat draaien, zodat de sessie op de juiste locatie zal beginnen.
4. Wat moet ik doen als de CD stukken overslaat of ermee ophoudt?
CD's van een slechte kwaliteit of CD's met vingerafdrukken of krassen zullen vaak niet goed of zelfs helemaal niet spelen. Haal de CD eruit. Probeer hem schoon te maken met een zachte, pluisvrije doek of een speciale schoonmaakdoek voor CD's, die in de meeste CD-winkels gekocht kan worden. Gebruik geen papieren handdoek of tissues. Maak de CD in rechte lijnen schoon vanuit het midden naar de kanten toe. Maak geen draaiende beweging. Als de CD het dan nog niet doet, moet hij worden gecontroleerd op krassen. Bekraste CD's moeten ter vervanging worden teruggestuurd.
5. Moet ik de CD-drive of laserlens schoonmaken?
Nee. Het soort drive dat in de Victor Reader wordt gebruikt, hoeft niet te worden schoongemaakt.
6. Mag ik een Braille-label of ander label op de CD aanbrengen?
Nee. Het label kan een ongunstig effect hebben op de balans van de CD als die op hoge snelheid draait. Bovendien kan het label, als het los zou raken in de speler, de CD-rom drive beschadigen. Als u een CD ontvangt met een Braille-label of ander label dat niet van de fabrikant afkomstig is, moet u dit verwijderen.
7. Waarom hoor ik soms het bericht "Een ogenblik geduld a.u.b." als ik op een toets druk, terwijl er wel een CD inzit?
Dit kan gebeuren als u te snel op een toets drukt nadat u de CD heeft geplaatst of de speler heeft aangezet. De Victor Reader heeft enige tijd nodig om de CD te scannen en de navigatie-informatie van de Daisy-CD te laden. Nadat u de speler heeft aangezet of een CD erin heeft gedaan, moet u wachten tot de Victor Reader de boektitel aankondigt voordat u op een toets drukt.
8. Wat betekent de melding "Geen boek op schijf"?

Deze melding geeft de Victor Reader als hij het type CD niet herkent. De Victor Reader kan alleen maar Daisy-, MP3- of audio-CD's afspelen.

9. Wat betekent de melding "Audio-formaat wordt niet ondersteund"?
De CD bevat audiobestanden die de Victor Reader herkent, maar de bestanden zijn zodanig geformatteerd dat ze niet compatibel zijn met de Victor Reader software. Neem in dat geval contact op met de afdeling Technische ondersteuning van Optelec op telefoonnummer 088 – 678 35 16.
10. Kan ik de Victor Reader beschadigen als ik een bekraste CD afspeel?
Nee. De leeslens van de CD komt niet in aanraking met het oppervlak van de CD, waardoor hij niet kan beschadigen als er een bekraste CD in de speler is geplaatst. De lens kan ook niet beschadigd raken als gevolg van herhaaldelijk afspelen, zoals bij cassettespelers.

9.4 Algemeen

1. Wat moet ik doen als de Aan/Uit-toets niet werkt?
Als u geen piepje hoort wanneer u op de Aan/Uit-toets drukt, controleer dan eerst of de speler wel is aangesloten op het stopcontact. Als de Aan/Uit-toets dan nog niet werkt, houd deze dan 10 seconden ingedrukt. Hierdoor zal de speler worden gereset. Als u er daarna nog eens op drukt, zou de Victor Reader een piepgeluid moeten laten horen en normaal moeten starten.
2. Kan ik de interne software van de Victor Reader updaten?
Ja. Als Optelec een upgrade heeft van de software van de Victor Reader, kunnen klanten de nieuwe software installeren door eenvoudigweg een CD met de upgrade in de speler te plaatsen. Deze zal automatisch het interne software-programma vernieuwen.
3. Moet ik bladwijzers verwijderen om geheugencapaciteit te besparen?
Nee. De Victor Reader kan meer dan 1500 bladwijzers opslaan, verspreid over een groot aantal boeken. Als dit aantal wordt overschreden, zal de Victor Reader de minst vaak gebruikte bladwijzers vervangen door de nieuwe. U hoeft bladwijzers dus alleen te verwijderen als u ze niet meer wenst te gebruiken.

10. Technische specificaties

- | | |
|---|--|
| ▪ Afmetingen zonder masker | 22 x 21,6 x 4,8 cm (8.7 x 8,5 x 1,9 inch) |
| ▪ Afmetingen met masker | 22,8 x 22,2 x 5,1 cm (9 x 8,7 x 2 inch) |
| ▪ Gewicht: | 0,95 kg (2,1 lbs) inclusief batterij |
| ▪ Ondersteunde DAISY-formaten: | DAISY 2.0 en 2.0.2
DAISY NISO Z39.86 2002 en Z39.86 2005 |
| ▪ Batterijtype:
mAh | Oplaadbare Li-polymeer batterij. 8,4 volt, 1650 |
| ▪ Oplaadtijd: | 4 uur |
| ▪ Levensduur batterij:
boeken | 10 uur bij continu afspelen van DAISY MP3- |
| ▪ Omgevingsomstandigheden: | Bedrijfstemperatuur: 10 - 40 °C
Opslagtemperatuur: -20 - 35 °C
Rel. vochtigheid (zonder condensatie): 5 - 90% |
| ▪ Voeding:
aan de
het apparaat is
uw dealer voor informatie
netadapters voor andere landen. | De meegeleverde netadapter voldoet uitsluitend
voedingsspecificaties voor het land waar
verkocht. Neem contact op met
over alternatieve |
| ▪ Code-algoritmen:
Speex, WAV | AAC, AMR-WB+, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, |
| ▪ Voedingsaansluiting | 2,5 mm (intern)/ 5,5 mm (extern) |
| ▪ Uitgangs-, hoofdtelefoonaansluitingen | 3,5 mm |

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Optelec:

Optelec Nederland
Postbus 399
2990 AJ Barendrecht

Breslau 4
2993 LT Barendrecht

Verkoop: 088 - 678 35 13
Support: 088 – 678 35 16
Service: 088 – 678 35 15

Website: www.optelec.nl
Webshop: www.shoptelec.nl

11. End User License Agreement

By using this product (Victor Reader Stratus) you agree to the following minimum terms.

1. License Grant. HumanWare grants to End User a non-exclusive, non-transferable right and license to use the Software on this product.
2. Ownership of Software. End User acknowledges that HumanWare retain all right, title and interest in and to the original, and any copies, of software which is incorporated into this product. End User agrees not to: modify, port, translate, decompile, disassemble, reverse engineer, or make public in any way the software of this Product.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)

12. Appendix 1 - Stratus Error Messages

SYSTEM error 1: CDROM, Does not apply.

SYSTEM error 2: MEMORY, Memory allocation problem.

MEDIA error 1: READ, Error reading sector on disc.

MEDIA error 2: FORMAT, Unsupported File system.

MEDIA error 3: MOUNT, Error while mounting device.

MEDIA error 4: AUDIO, Does not apply.

MEDIA error 5: FILE, Error accessing the audio file.

MEDIA error 6: WAV, Error creating new wav structure.

MEDIA error 7: MPEG, Error handling an mpeg file.

MEDIA error 8: VORBIS, Error handling a vorbis file.

MEDIA error 9: NO AUDIO, No audio output available.

MEDIA error 10: AMR-WB+, Error handling a AMR-WB+ file.

MEDIA error 11: MP4-AAC, Error handling a MP4-AAC file.

MEDIA error 12: WRITE, Unable to open file for writing.

MEDIA error 13: SDLOST, card removed during write operation.

MEDIA error 14: USBLOST, USB device removed during write operation.

BOOK error 1: GENERIC, Unspecified.

BOOK error 2: MP3, Error with the mp3 decoder.

BOOK error 3: VORBIS, Error with the ogg vorbis decoder.

BOOK error 4: WAV, Error with the wav decoder.

BOOK error 5: NO FILE NAME, No file name available.

BOOK error 6: NO CUR POS, No current position is set.

BOOK error 7: FILE NOT FOUND, File not found on MCART.

BOOK error 8: AMR-WB+, Error with the AMR-WB+ decoder.

BOOK error 9: Audible.com DRM, Player unauthorized to play a book due to DRM.

BOOK error 10: VRTEXT, Error parsing text file.

BOOK error 11: TEXT SIZE, Text file is too big.

BOOK error 12: Braille translation error.

BOOK error 13: MP4-AAC, Error with the MP4-AAC decoder.

BOOK error 14: Re-parse text, Error re-parsing text file.

BOOK error 15: STRUCT_SIZE, Text book structure too big.

Important Safety Instructions

Follow all warnings, cautions, and instructions marked on the product.

Carefully read the instructions described in this user guide prior to using the Stratus.

Only use or store the Stratus on stable and solid surfaces.

Keep away from water or high humidity. Do not submerge.

Only use cables provided with the Stratus.

The power supply cord is a disconnect device for pluggable equipment. The socket-outlet should be installed near the equipment, and be easily accessible.

This product should be operated from the type of power indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power available, consult your dealer or local power company.

Refer all servicing of this product to qualified service personnel. Do not attempt to service it yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks.



The above exclamation point within an equilateral triangle is intended to inform the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Battery Safety precautions

- Do not use or leave the battery near heat source and fire. Do not store in high temperatures
- Only use the Stratus power adapter to charge the battery
- Do not disassemble or modify the battery
- Do not short circuit the terminals
- Do not immerse the battery in water, do not allow it to get wet
- Do not strike or throw the battery
- Do not pierce or strike the battery with sharp objects or a hammer
- Do not solder the battery
- Do not reverse the positive and negative terminals
- Do not use the battery for purposes other than those intended by manufacturer
- Do not use the battery with primary battery or batteries of different capacities or brands
- If the battery leaks and liquid gets into the eyes, do not rub eyes. Instead, rinse the eyes with clean running water and seek immediate medical attention to prevent injury
- If the battery leaks and comes into contact with skin, immediately rinse area with clean running water to prevent injury

Medical Compliance Warnings

This product is equipped with a 3-wire grounding type plug as a safety feature. This plug has a third (grounding) pin and can only be plugged into a grounding-type power outlet. If necessary, contact an electrician to replace your power outlet with a grounding-type power outlet.

This product should be operated with the external power supply indicated on the marking label to ensure compliance with the requirements of IEC 60601-1. The external power supply must be of the following manufacturer and model:

Manufacturer: GlobTek, Inc.

Model Number: GTM9100P10012

Electromagnetic compatibility: The use of accessories and cables other than those specified by HumanWare may result in increased emissions or decreased immunity of the Stratus.

Placement of equipment: The Stratus should not be used adjacent to or stacked with other equipment.

Headphone connector shall be connected to medical grade SELV circuits only or they shall be connected to medical grade isolating devices.

FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Notice for Canada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment regulations.

Disposal

At the end of the life of the Victor Reader Stratus, its internal components must be disposed in compliance with the local authorities.

The Victor Reader Stratus contains no hazardous materials. For disposal, return to HumanWare or follow local governing ordinances or hospital procedure.

Klantenondersteuning

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Optelec:

Optelec Nederland
Postbus 399
2990 AJ Barendrecht

Breslau 4
2993 LT Barendrecht

Verkoop: 088 - 678 35 13
Support: 088 - 678 35 16
Service: 088 - 678 35 15

Website: www.optelec.nl
Webshop: www.shoptelec.nl


HumanwareTM

www.humanware.com
eu.support@humanware.com